



# GRIP-LOK®

## Nahtfreie Fixierung für ARROW ZVK/PICC-Katheter

### ÜBERBLICK

- sicher
- einfache Anwendung
- hypoallergen
- atmungsaktiv und latexfrei zur Senkung des Risikos allergischer Reaktionen und Hautreizungen

### SICHERE, EINFACHE FIXIERUNG

Der Grip-Lok ist Teil eines umfassenden Konzepts für ZVK/PICC, das speziell für Teleflex entwickelt wurde, um das Infektionsrisiko bei Katheterisierungen zu reduzieren.

Beim Grip-Lok handelt es sich um ein nahtfreies Fixierungssystem, das den Katheter an jedem Zugang sicher fixiert und bei jedem Patienten angewendet werden kann. Das weiche, ausgeschnittene, anschlussförmige Element erleichtert die Positionierung des Katheters und ermöglicht eine perfekte Fixierung und Stabilisierung.

- mehr Patientenkomfort durch weiches, flexibles Design
- bessere Stabilisierung des Katheters bei versehentlich senkrechtem und waagrechtem Zug an der Infusionsleitung
- einfach anzulegen, zu prüfen und zu korrigieren



*Nahtfreie Fixierung Grip-Lok*



*Das weiche, ausgeschnittene, anschlussförmige Element ermöglicht eine perfekte Fixierung und Stabilisierung*



*Das weiche, ausgeschnittene, anschlussförmige Element passt unter die zusätzlichen Fixierflügel des Katheters*

## POSITIONIERUNG DES GRIP-LOK™ – DAS NAHTFREIE SYSTEM FÜR ARROW ZVK-/PICC-KATHETER



Die Beschreibung der Anwendung des Grip-Lok ersetzt nicht ein sorgfältiges Durchlesen der Gebrauchsanweisung.

GRIP-LOK®		
ART. NR.	BESCHREIBUNG	VE
3303MCS-TA-1	Nahtfreie Fixierung für ARROW ZVK/PICC-Katheter	50

Unter [www.zefon.com](http://www.zefon.com) finden Sie ein Demonstrationsvideo über den Grip-Lok.



Vorderseite

Rückseite

Bereiten Sie die Haut wie üblich vor.

Eventuell muss die Haut vorbereitet oder rasiert werden, um eine bessere Haftung zu erzielen.

- ① Öffnen Sie den oberen Flügel und schieben Sie den Grip-Lok unter den Katheteranschluss. Positionieren Sie den Anschluss auf dem hierfür vorgesehenen Bereich der Klebefläche und drücken Sie die Klebefläche vorsichtig an.
- ② Entfernen Sie die Schutzfolie von einer Seite und halten Sie dabei den Grip-Lok fest. Entfernen Sie dann die Folie auf der anderen Seite.
- ③ Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche des Flügels.
- ④ Verschießen Sie den Flügel über dem Katheteranschluss und drücken Sie die Klebefläche an. Der selbsthaftende Teil des Flügels kann neu positioniert werden, sodass man den Katheter prüfen und korrigieren kann.

Verbinden Sie den Grip-Lok nach Fixierung in üblicher Weise. Wechseln Sie den durchsichtigen Klebeverband durch Dehnen.

Grip-Lok ist eine Marke von Zefon International.

### VERTRIEB DURCH:

TELEFLEX MEDICAL ZENTRALE EMEA, IRLAND · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Athlone · Co Westmeath

Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · [orders.intl@teleflex.com](mailto:orders.intl@teleflex.com)

DEUTSCHLAND Tel. +49 (0)7151 406 0 · [info.de@teleflex.com](mailto:info.de@teleflex.com)

ÖSTERREICH Tel. +43 (0)1 402 47 72 · [rueschaustralia@teleflex.com](mailto:rueschaustralia@teleflex.com)

SCHWEIZ Tel. +41 (0)31 818 40 90 · [info.ch@teleflex.com](mailto:info.ch@teleflex.com)

WWW.TELEFLEX.COM

94 10 93 - 00 00 00 · REV A · 06 11 02 · Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.

**Teleflex**