



RÜSCH EASYCRIC

Set per cricotirotonomia di emergenza con tecnica Seldinger

IN SINTESI

- set completo per cricotirotonomia con tecnica Seldinger per adulti (misura 5)
- cannula EasyCric preformata anatomicamente con rivestimento idrofilico, premontata sul dilatatore
- presa ergonomica
- set composto da: ago di punzione, siringa, fascia di fissaggio, soluzione salina
- sterile
- latex-free
- monouso

FOCALIZZARE L'ATTENZIONE SU PRESTAZIONI E SICUREZZA – QUANDO ANCHE I SECONDI CONTANO


La cricotirotonomia è una procedura di emergenza in situazioni di occlusione delle vie aeree superiori e da utilizzare come ultima risorsa quando è necessario ottenere accesso immediato alle vie aeree del paziente. Decisioni in tempi rapidi, velocità, prestazioni accurate e sicure sono essenziali in una delle situazioni più stressanti per i medici.

Utilizzando il set EasyCric di RÜSCH (un marchio del gruppo Teleflex), ideato dal Prof. Giulio Frova, la procedura per cricotirotonomia può essere più sicura, semplice ed efficace e contribuisce a migliorare le condizioni del paziente¹.

EasyCric consente la tecnica con filo guida di Seldinger per il posizionamento sicuro e accurato. Grazie al rivestimento idrofilico e al design anatomico dell'intero

dispositivo (tubo premontato e dilatatore, presa ergonomica, flangia di fissaggio fissa), è possibile garantire un inserimento semplice ed atraumatico e una gestione sicura da parte del medico. Il set è completato da accessori in perfetto abbinamento quali un ago di punzione, una siringa e una soluzione salina per eseguire il test di aspirazione dell'aria tramite siringa e per attivare il rivestimento idrofilico.

Il set per cricotirotonomia di emergenza EasyCric è un dispositivo da utilizzare come ultima risorsa quando qualsiasi altra procedura risulta impossibile. Avere sempre un set pronto a disposizione può salvare la vita di un paziente.

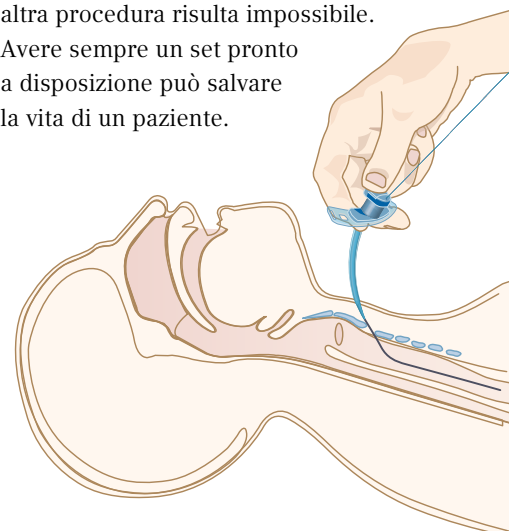

¹(G.Frova, G. Merli, M. Sorbello, "First evaluation of a new cricothyrotomy set. Comparison of Melker, Minitrach II S, Quicktrach and EasyCric in a mannequin". ESA 2010, 19APS – 10, 267.)



COMPONENTI DEL SET

- ① Cannula tracheostomica EasyCric, trasparente, premontata sul dilatatore di inserimento EasyCric blu, connettore da 15 mm flangia di fissaggio trasparente fissa
- ② Filo guida (non soggetto a kinking, punte morbide diritte, lunghezza 40 cm, Ø1,3 mm)
- ③ Fascia di fissaggio
- ④ Ago di puntura (3 cm)
- ⑤ Bisturi
- ⑥ Siringa Luer-lock (5 ml)
- ⑦ 20 ml soluzione salina

SET PER CRICOTIROTOMIA DI EMERGENZA EASYCRIC (Art. 120605)


MISURA	DI PROSSIMALE IN MM	DI DISTALE IN MM	DE PROSSIMALE IN MM	DE DISTALE IN MM	L (LINEA CENTRALE) IN MM	LUNGHEZZA TOTALE IN MM	ANGOLAZIONE IN GRADI°	QTY
5.0	6.0	5.0	8.5	5.8	70.0	95.0	66.9°	1

DILATATORE DI INSERIMENTO

DI AL GRIP IN MM	DI DISTALE IN MM	DE DISTALE IN MM	LUNGHEZZA DAL GRIP ALLA PUNTA IN MM	LUNGHEZZA TOTALE IN MM	ANGOLAZIONE IN GRADI°
3.0	1.5	2.0	125.0	130.0	66.9°



Dilatatore di inserimento blu con zona grip ergonomica per una gestione più sicura.

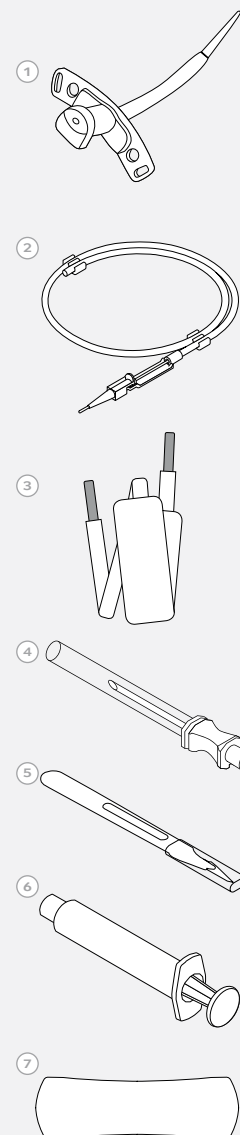

DISTRIBUITO DA:

SEDE TELEFLEX MEDICAL EMEA, IRLANDA · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Athlone Co Westmeath

Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

ITALIA Tel. +39 (0) 362 589 11 · info.it@teleflex.com

WWW.TELEFLEX.COM

94 06 37 · 00 00 04 · REV A · 01 12 03 · Dati aggiornati al momento della stampa. Soggetti a modifiche tecniche senza ulteriore preavviso.

teleflex