



## CATHÉTER 5 LUMIÈRES ARROW

Design optimisé – caractéristiques améliorées

### APERÇU

Comparativement à notre précédent cathéter 5L, notre nouveau cathéter 5 lumières 9,5 Fr présente une meilleure résistance à la plicature tout en conservant les mêmes caractéristiques de débit et la même flexibilité. Ce nouveau cathéter présente les caractéristiques suivantes :

- section transversale redessinée du corps du cathéter/ configuration des lumières avec résine de polyuréthane optimisée
- taille unifiée des lignes d'extension
- nouveau clamp de fixation secondaire
- disponible en deux longueurs : 16 et 20 cm et dans de nombreuses configurations de sets

### MEILLEURES RÉSISTANCE À LA PLICATURE ET FIXATION, PLUS DE SÉCURITÉ POUR LE PATIENT

Teleflex s'engage à améliorer continuellement ses produits afin de pouvoir offrir aux médecins les solutions nécessaires pour traiter leurs patients de manière optimale.


Le nouveau cathéter veineux central 5 lumières optimisé de ARROW a été conçu pour répondre à vos besoins en offrant une meilleure résistance à la plicature et une plus grande sécurité pour le patient grâce à une fixation secondaire améliorée.

En repensant soigneusement la conception de la section transversale du corps du cathéter, en veillant à une alliance optimale entre la configuration des lumières et la résine de polyuréthane, nous avons pu accroître la résistance du cathéter à la plicature.

Le CVC 5 lumières permet de pratiquer simultanément des administrations de médicaments, des nutriments parentéraux, des injections de liquides, des échantillonnages sanguins et des surveillances de la circulation veineuse centrale via un seul site d'accès veineux central.

Un nouveau clamp de fixation secondaire a également été spécialement conçu pour améliorer la stabilité du cathéter et assurer la sécurité du patient.

Ce nouveau cathéter est disponible en plusieurs longueurs et dans de nombreuses configurations de sets.

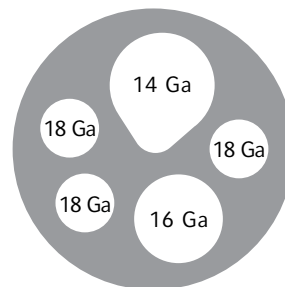

## DÉBITS ET VOLUMES DE RINÇAGE

DESCRIPTION	VOLUME DES LUMIÈRES	VOLUME DE RINÇAGE <sup>1</sup> (ML)	DÉBIT <sup>2</sup> (ML/H)
9,5 Fr x 16 cm	Dist. (16 Ga)	0,43	4,200
	Méd. 1 (14 Ga)	0,47	6,465
	Méd. 2 (18 Ga)	0,35	1,535
	Méd. 3 (18 Ga)	0,35	1,490
	Prox. (18 Ga)	0,39	1,590
9,5 Fr x 20 cm	Dist. (16 Ga)	0,48	3,605
	Méd. 1 (14 Ga)	0,57	5,390
	Méd. 2 (18 Ga)	0,38	1,250
	Méd. 3 (18 Ga)	0,38	1,160
	Prox. (18 Ga)	0,41	1,455

<sup>1</sup> Les volumes de rinçage sont approximatifs et sont mesurés sans bouchon d'injection. Le volume de rinçage du bouchon d'injection est de 0,020 ml.

<sup>2</sup> Les débits sont mesurés avec de l'eau, à température ambiante, à une hauteur de tête de 100 cm et ils indiquent les capacités de débit approximatives.



## SETS DE CATHÉTERS 5 LUMIÈRES ARROW 9,5 FR

RÉF.	LUMIÈRE	Ø FR	LONGUEUR CM	LUMIÈRE INTÉRIEURE	GUIDE SPIRALÉ <sup>3</sup> Ø MM (POUCE)	AIGUILLE D'INTRODUCTION À PAROI FINE (XTW) <sup>4</sup>	CATHÉTER PRÉMONTÉ SUR AIGUILLE <sup>5</sup>	SERINGUE 5 ML LUER SLIP	BOUCHONS AVEC SITE D'INJECTION	QTÉ
CV-12955	5	9,5	16	16-14-18-18-18	0,81 (0,032") x 60 cm	x		x	x	5
CS-15955	5	9,5	20	16-14-18-18-18	0,81 (0,032") x 60 cm	x	x	x	x	5
CV-15955	5	9,5	20	16-14-18-18-18	0,81 (0,032") x 60 cm	x		x	x	5

<sup>3</sup> Guide avec repère ECG supplémentaire sur CS-15955 et CV-15955

<sup>4</sup> Aiguille d'introduction 18 Ga X 6,35 cm (2 1/2") à paroi fine (XTW)

<sup>5</sup> Cathéter prémonté 18 Ga X 6,35 cm (2 1/2") sur une aiguille d'introduction 20 Ga à paroi normale RW

Exclusivement sur ordonnance médicale

Ce document est à destination des professionnels de santé. Veuillez vous référer très attentivement à la notice d'utilisation pour les recommandations.

Vérifier l'intégrité de l'emballage du dispositif médical avant usage.

Classe des dispositifs médicaux: III. Organisme notifié : BSI- CE0086. Fabricant: ARROW US

TELEFLEX SIÈGE SOCIAL, IRLANDE · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Dublin Road · Athlone · Co Westmeath

Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

FRANCE Tél. +33 (0)5 62 18 79 40 · info.fr@teleflex.com

BELGIQUE Tél. +32 (0)2 333 24 60 · info.be@teleflex.com

SUISSE Tél. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com

WWW.TELEFLEX.COM

94 11 24 · 00 00 02 · REV A · 03 14 01 · Toutes les informations communiquées dans ce document sont exactes au moment de l'impression. Elles peuvent faire l'objet de modification technique sans préavis.

**Teleflex**