



LMA Fastrach™ Technische Anleitung


Einführtechnik: Zum Einführen der LMA Fastrach™

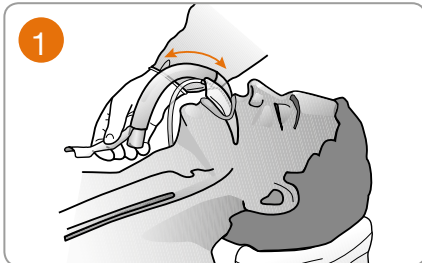

Entleeren Sie den Cuff der Maske und tragen Sie auf die posteriore Seite der Maske ein wasserlösliches Gleitmittel auf. Verteilen Sie das Gleitmittel auch über den anterioren Teil des harten Gaumens.

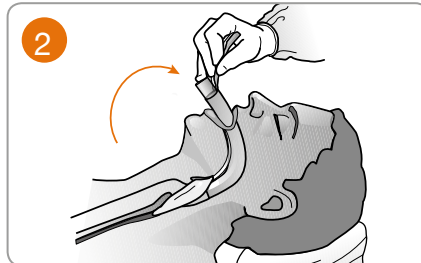


Bringen Sie die Maske in einer kreisförmigen Bewegung in Position. Halten Sie den Druck gegen den Gaumen und den hinteren Kehlkopf dabei aufrecht. Verwenden Sie keinesfalls den Griff als Hebel.

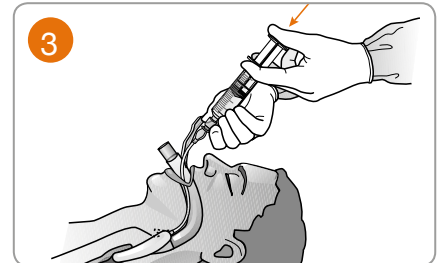


Befüllen Sie den Cuff auf einen Druck von ca. 60 cm H₂O.

Einführtechnik: Zum Einführen des LMA™ ET-Tubus (ETT) und Entfernen der LMA Fastrach™

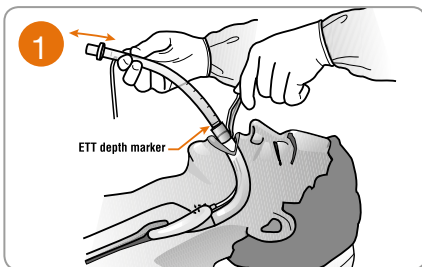


Halten Sie die LMA Fastrach™ am Griff fest, während Sie vorsichtig den mit Gleitmittel versehenen ETT in den Atemwegsschaft einführen.

(Die Verwendung standardmäßiger gebogener ETTs aus PVC ist nicht ratsam.)

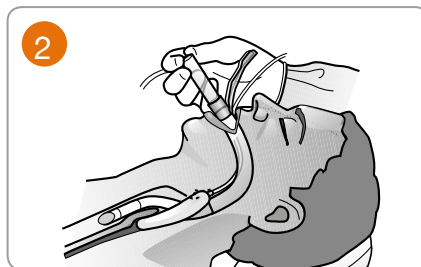

Führen Sie den ETT weiter ein, befüllen Sie den Cuff und bestätigen Sie die Intubation.

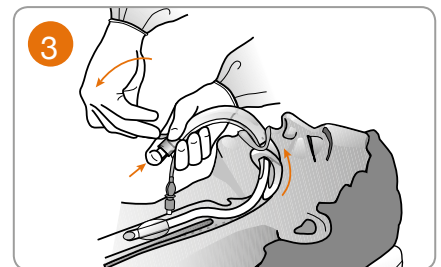

Entleeren Sie den Cuff der LMA Fastrach™ vollständig. Entfernen Sie den ETT-Konnektor und ziehen Sie die LMA Fastrach™ heraus, indem Sie den Griff vorsichtig nach kaudal schwenken. Fixieren Sie den ETT mithilfe des Tubusstabilisators, bis der Tubus auf Höhe der Schneidezähne gegriffen werden kann.



Entfernen Sie den Tubusstabilisator und umfassen Sie den ETT mit festem Griff, während Sie vorsichtig den Luftzuführungsschlauch und den Pilotballon durch den Schaft der LMA Fastrach™ ziehen.

Setzen Sie den ETT-Konnektor wieder auf und beatmen Sie den Patienten.

Aktuellste klinische Evidenz zur LMA Fastrach™ bei: www.lmaco.com/evidence




Nach dem Einführen der LMA Fastrach™:

1) Optimieren Sie vor der Intubation den Atemweg:

Für eine einfachere Intubation verbessern Sie die Position der LMA Fastrach™, indem Sie folgendermaßen vorgehen:

- ▶ Halten Sie die LMA Fastrach™ am Griff fest und beatmen Sie den Patienten vorsichtig.
- ▶ Umfassen Sie den Griff fest und heben Sie die LMA Fastrach™ mithilfe des Griffes an, um den Larynx nach vorne zu heben.
- ▶ Schieben Sie den ETT vorsichtig in die LMA Fastrach™. Ist kein Widerstand zu spüren, führen Sie den ETT weiter ein, während Sie die Maske festhalten.

2) Korrekte Platzierung:

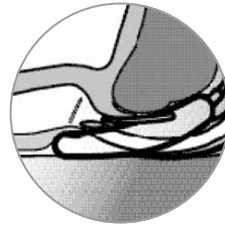

Führen Sie den ETT ein und befüllen Sie den Cuff. Überprüfen Sie das endtidale CO₂.

3) Verbesserung der Intubationsbedingungen beim Einführen des LMA™ ET-Tubus

Widerstand zu spüren nach:

2 cm Jenseits der 15-cm-Markierung am ETT (Querlinie):	Tubus traf auf vestibuläre Wand	Dies kann ggf. durch Drehung des ETT behoben werden.			
2 cm Jenseits der 15-cm-Markierung am ETT (Querlinie):	Epiglottis nach unten gefaltet		Schwenken Sie die LMA Fastrach™ ohne Entleerung des Cuffs um ca. 6 cm nach außen und führen Sie sie erneut ein.		Optimieren Sie den Atemweg erneut und wiederholen Sie den Intubationsversuch
3 cm Jenseits der Querlinie des ETT:	LMA Fastrach™ zu klein		Epiglottis kann mit dem Epiglottisheber nicht erreicht werden.		Größeres Produkt verwenden
Umgehend ETT-Tiefenmarkierung ist noch sichtbar oder befindet sich knapp, d. h. nur wenige mm, in der LMA Fastrach™:	LMA Fastrach™ zu groß	Bei Patienten mit normalem oder dünnem Hals:			Kleineres Produkt verwenden
4 cm – 5 cm Jenseits der Querlinie des ETT:	LMA Fastrach™ zu groß	Bei Patienten mit breitem kurzem Hals:			Kleineres Produkt verwenden

Die technische Anleitung geht von der Verwendung des geraden, drahtverstärkten Silikon-ETT aus, der speziell für den Gebrauch mit der LMA Fastrach™ entwickelt wurde.

TELEFLEX HEADQUARTER INTERNATIONAL, IRLAND
Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park,
Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irland
Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 Fax +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@teleflexmedical.com

Copyright © 2013 Teleflex Incorporated. All rights reserved. LMA, LMA Better by Design, LMA Fastrach sind Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder seiner Tochtergesellschaften.

Teleflex www.teleflex.com LMA International www.lmaco.com



Hergestellt von:
The Laryngeal Mask Company Limited
Le Rocher, Victoria, Mahé, Seychellen



Ziehen Sie die Gebrauchsanweisung auf der folgenden Homepage zu Rate:
www.lmaco.com



Printed on paper from sustainable sources

PAC-2502-005 Rev B DE 201312