



# Guide de manipulation du masque laryngé LMA Fastrach


## Technique d'insertion : Pour insérer le LMA Fastrach

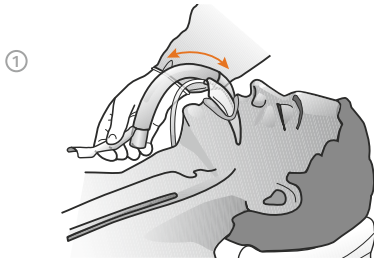

① Dégonflez le coussinet du masque et utilisez un lubrifiant hydrosoluble sur la surface postérieure. Frottez le lubrifiant sur la partie antérieure de la voûte palatine.

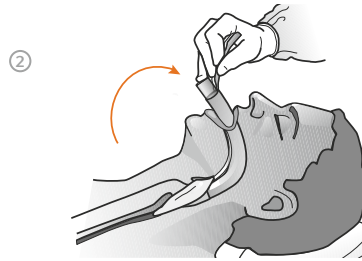


② Mettez le masque en place en effectuant un mouvement circulaire, tout en vous assurant que la pression soit maintenue contre le palais et le pharynx postérieur. N'utilisez jamais la poignée comme levier.

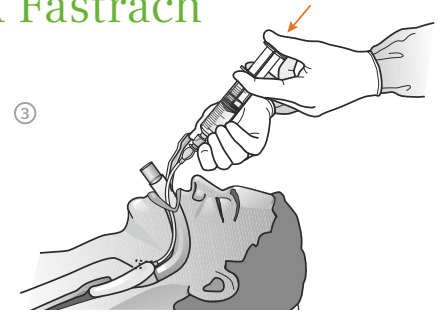

③ Gonflez le coussinet à une pression d'environ 60 cm H<sub>2</sub>O.


## Technique d'insertion : Pour insérer la sonde endotrachéale LMA ETT et retirer le masque laryngé LMA Fastrach

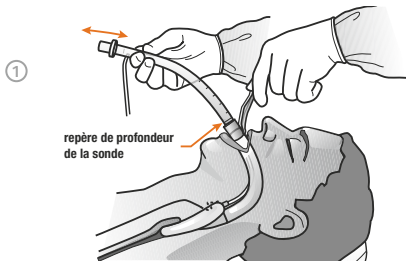

① Tenez la poignée du dispositif LMA Fastrach tout en insérant doucement la sonde endotrachéale lubrifiée dans le conduit aérien. (L'utilisation de sondes endotrachéales standard, courbes, en PVC n'est pas recommandée.)



② Faites avancer la sonde endotrachéale, dégonflez le coussinet et confirmez l'intubation.

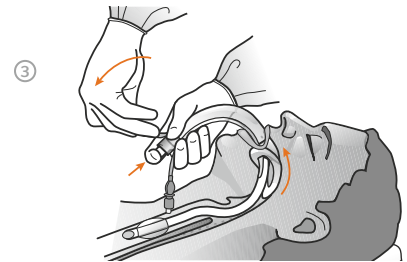

③ Dégonflez totalement le coussinet du LMA Fastrach. Retirez le raccord de la sonde endotrachéale et faites glisser le LMA Fastrach en faisant pivoter doucement sa poignée de manière caudale. Utilisez la tige de stabilisation pour maintenir la sonde endotrachéale en place jusqu'à ce que le tube puisse être saisi au niveau des incisives.



④ Retirez la tige de stabilisation et saisissez fermement la sonde endotrachéale tout en déconnectant délicatement la ligne de gonflage et le ballonnet témoin de la sonde. Remplacez le raccord de la sonde endotrachéale et ventilez le patient.

Pour connaître les dernières preuves cliniques sur LMA Fastrach rendez-vous sur [www.lmaco.com/evidence](http://www.lmaco.com/evidence)



Une fois que le LMA Fastrach a été inséré :

## 1) Optimisez la voie aérienne avant l'intubation :

Positionnez le LMA Fastrach de façon à obtenir la voie aérienne la moins résistante et la plus aisée possible, en :

- Tenant la poignée du dispositif et en ventilant doucement le patient
- Saisissant fermement la poignée et en soulevant le dispositif à l'aide de celle-ci pour faire avancer le larynx
- Faisant glisser la sonde endotrachéale délicatement dans le LMA Fastrach. Si aucune résistance n'est ressentie, continuez à faire avancer la sonde endotrachéale tout en tenant fermement le dispositif







## 2) Mise en place correcte :

Insérez la sonde endotrachéale et gonflez le coussinet. Vérifiez le CO<sub>2</sub> de fin d'expiration.



## 3) Surmontez la résistance à l'insertion de la sonde LMA ETT :

### Résistance ressentie à :

<b>2 cm</b> Au-delà de la marque de 15 cm sur la sonde endotrachéale (ligne transversale) :	La sonde butte sur la paroi vestibulaire	Faire pivoter la pointe de la sonde pourrait résoudre ce problème.			
<b>2 cm</b> Au-delà de la marque de 15 cm sur la sonde endotrachéale (ligne transversale) :	L'épiglotte est pliée vers le bas		Sans dégonfler le coussinet, faites glisser le dispositif en arrière d'environ 6 cm, puis réinsérez.		Optimisez à nouveau et retentez l'intubation
<b>3 cm</b> Au-delà de la ligne transversale de la sonde endotrachéale :	Le LMA Fastrach est trop petit		L'épiglotte est hors de portée de la barrette de soulèvement de l'épiglotte.		Utilisez une taille plus grande
<b>Immédiate</b> Alors que l'indicateur de profondeur de la sonde endotrachéale est toujours visible, ou à quelques mm seulement dans le tube du LMA Fastrach :	Le LMA Fastrach est trop grand	Chez les patients présentant un cou mince ou normal :			Utilisez une taille plus petite
<b>4 cm – 5 cm</b> Au-delà de la ligne transversale de la sonde endotrachéale :	Le LMA Fastrach est trop grand	Chez les patients présentant un cou large et court :			Utilisez une taille plus petite

Le Guide de manipulation suppose que vous utilisez la sonde endotrachéale droite en silicone armé, développée spécifiquement pour être utilisée avec le LMA Fastrach.

Fabriqué par : The Laryngeal Mask Company Limited · Le Rocher, Victoria, Mahé, Seychelles

Teleflex, the Teleflex logo, LMA, and LMA Fastrach are trademarks or registered trademarks of Teleflex Incorporated or its affiliates, in the U.S. and/or other countries. Information in this document is not a substitute for the product Instructions for Use. The products in this catalogue may not be available in all countries. Please contact your local representative. All data current at time of printing (04/2017). Subject to technical changes without further notice. © 2017 Teleflex Incorporated. All rights reserved. 94 06 98 - 00 00 02 - REV B - 04 17 02



**Teleflex**

Distribué par : Siège social international de Teleflex, Irlande · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology Park  
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com  
France Tél. +33 (0)5 62 18 79 40 · info.fr@teleflex.com  
Belgique Tél. +32 (0)2 333 24 60 · info.be@teleflex.com  
Suisse Tél. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com  
www.teleflex.com