

Arrow

Technologie Chlorag⁺ard

Recommandations relatives à la technique de pansement

Recommandations pour la technique au-dessus et en-dessous du pansement

Pour les patients avec un INR élevé (> 3), un taux de plaquettes faible (< 100) et/ou une perfusion d'héparine standard en continu, veuillez envisager l'utilisation de la technique au-dessus et en-dessous du pansement.

① Maintenir une pression avec les doigts.

- Après insertion du cathéter, exercer une pression avec les doigts sur un tampon de gaze 2 x 2 au niveau du site d'insertion pendant deux minutes.
- Ne pas oublier : si la pression n'est pas maintenue, un écoulement est possible.

② Fixer.

- Tout en exerçant une pression avec les doigts, appliquer une embase amovible SecondSite (si nécessaire).
- Fixer l'embase du cathéter au dispositif de fixation et appliquer un BioPatch (le cas échéant) sur le PICC.
- Limiter le mouvement et la manipulation du PICC une fois l'hémostase obtenue.

③ Appliquer le pansement sous pression.


- Superposer deux tampons de gaze 2 x 2, pliés en deux et pliés en deux à nouveau.
- Placer les tampons de gaze 2 x 2 pliés sur le site d'insertion au-dessus du BioPatch et fixer à l'aide de Steri-Strips ou de ruban stérile.
- Appliquer le pansement transparent.
- Superposer deux tampons de gaze 2 x 2, pliés en deux et pliés en deux à nouveau.
- Placer les tampons de gaze 2 x 2 pliés sur le pansement transparent au-dessus du site d'insertion.
- Fixer avec du ruban appliqué en croix.
- Au bout de 24 heures, retirer le ruban entrecroisé et la gaze ; inspecter le pansement et le remplacer selon le protocole hospitalier.



①



②

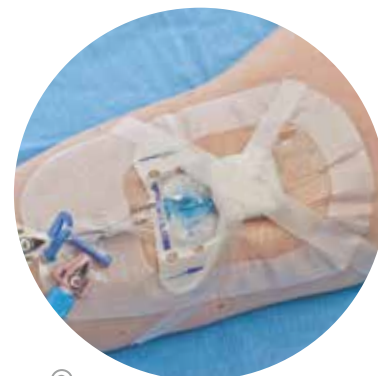

③

Consulter le mode d'emploi du fabricant pour connaître les références complètes du produit.

Attention : Éviter d'utiliser un matériau de pansement élastique de moins de 5 cm de large qui pourrait avoir un effet de garrot. Le pansement sous pression ne doit pas empêcher la circulation artérielle. Évaluer la perfusion adéquate des tissus en aval du pansement à intervalles réguliers pour vérifier que la circulation veineuse n'est pas compromise.

Arrow

Technologie Chlorag⁺ard

Recommandations relatives à la technique de pansement

Recommandations pour la technique au-dessus du pansement

Étant donné que Chlorag⁺ard agit comme une véritable technologie antithrombogénique, un suintement passager peut être observé au niveau du site d'insertion. Dans ce cas, envisager l'utilisation de la technique au-dessus du pansement.

① Maintenir une pression avec les doigts.

- Après insertion du cathéter, exercer une pression avec les doigts sur un tampon de gaze 2 x 2 au niveau du site d'insertion pendant deux minutes.
- Ne pas oublier : si la pression n'est pas maintenue, un écoulement est possible.

② Fixer.

- Tout en exerçant une pression avec les doigts, appliquer une embase amovible SecondSite (si nécessaire).
- Fixer l'embase du cathéter au dispositif de fixation et appliquer un BioPatch (le cas échéant) sur le PICC.
- Limiter le mouvement et la manipulation du PICC une fois l'hémostase obtenue.

③ Appliquer le pansement sous pression.

- Appliquer le pansement transparent.
- Superposer deux tampons de gaze 2 x 2, pliés en deux et pliés en deux à nouveau.
- Placer les tampons de gaze 2 x 2 pliés sur le pansement transparent au-dessus du site d'insertion.
- Fixer avec du ruban appliqué en croix.
- Au bout de 24 heures, retirer le ruban entrecroisé et la gaze ; inspecter le pansement et le remplacer selon le protocole hospitalier.

Consulter le mode d'emploi du fabricant pour connaître les références complètes du produit.



①



②



③

Attention : Éviter d'utiliser un matériau de pansement élastique de moins de 5 cm de large qui pourrait avoir un effet de garrot. Le pansement sous pression ne doit pas empêcher la circulation artérielle. Évaluer la perfusion adéquate des tissus en aval du pansement à intervalles réguliers pour vérifier que la circulation veineuse n'est pas compromise.

BioPatch est une marque déposée de Johnson & Johnson. Steri-Strip est une marque commerciale de 3M. Teleflex, le logo Teleflex, Arrow, Chlorag⁺ard sont des marques commerciales ou déposées de Teleflex Incorporated ou de ses filiales, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Les informations incluses dans le présent document ne sauraient se substituer à la notice du produit. Il est possible que les produits de ce catalogue ne soient pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant local. Données en cours de validité à la date d'impression (02/2017). Susceptible de modifications techniques sans préavis.
© 2017 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés. 94 11 41 - 00 00 02 · RÉV A · 02 17 01.3