



RÜSCH EASYCRIC

Notfall-Koniotomieset auf Seldinger-Basis

AUF EINEN BLICK

- komplettes Koniotomie-Set für Erwachsene auf Seldinger-Basis (Größe 5)
- vormontierter EasyCric-Tubus und Dilatator (hydrophile Beschichtung, anatomische Form)
- ergonomischer Griff
- gut aufeinander abgestimmte Set-Komponenten (u.a. Punktionskanüle, Spritze, Kochsalzbeutel)
- steril
- latexfrei
- zum Einmalgebrauch

SICHERHEIT UND EFFIZIENZ – WENN JEDE SEKUNDE ZÄHLT

Die Koniotomie ist ein potenziell lebensrettendes Notfallverfahren, wenn ein sofortiger Zugang zu den anderweitig nicht zugänglichen Atemwegen des Patienten erforderlich ist. Schnelle Entscheidungen und Vorgehensweisen, sowie eine sichere und punktgenaue Ausführung sind in einer der mit dem größten Stress für den Arzt verbundenen Situationen von entscheidender Bedeutung.


Mit der Einführung des EasyCric Notfall-Koniotomiesets der Marke RÜSCH von Teleflex, das von Prof. Giulio Frova entwickelt wurde, kann dieses Verfahren sicherer, einfacher und effizienter durchgeführt werden und somit dazu beitragen, bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen¹.

Das einzigartige EasyCric Koniotomie-Set ermöglicht dank seiner auf Seldinger basierenden Führungssdrahttechnik eine sichere und exakte Platzierung.

Die hydrophile Beschichtung und die anatomische Form des gesamten Produkts (vormontierter Tubus und Dilatator, ergonomischer Griff und fixierte Halteplatte) sorgen für eine einfache und atraumatische Einführung und sichere Handhabung. Komplettiert wird das Set durch gut aufeinander abgestimmtes Zubehör wie eine Punktionskanüle, eine Spritze sowie die Kochsalzlösung für den Luftaspirationstest und die Aktivierung der hydrophilen Beschichtung.

Das EasyCric Notfall-Koniotomieset ist ein Produkt für den Fall, dass kein anderes Verfahren angewendet werden kann. Ein sofort einsatzbereites Set zur Hand zu haben, kann Leben retten.

¹(G.Frova, G. Merli, M. Sorbello, "First evaluation of a new cricothyrotomy set. Comparison of Melker, Minitrach II S, Quicktrach and EasyCric in a mannequin". ESA 2010, 19APS – 10, 267.)

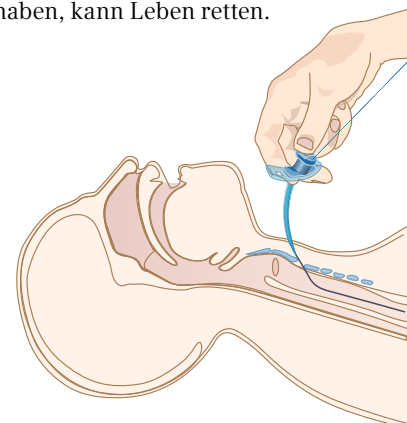



SETINHALT







- ① EasyCric Tracheostomie-Tubus, durchsichtig, 15 mm Anschluss und fixierte, durchsichtige Halteplatte, vormontiert auf dem EasyCric Dilatator, blau
- ② Führungsdraht (Knickschutz, gerade weiche Enden, 40 cm lang, Ø 1,3 mm)
- ③ Komfort-Halteband
- ④ Punktionskanüle (3 cm)
- ⑤ Skalpell
- ⑥ Luer-Lock-Spritze (5 ml)
- ⑦ 20 ml Kochsalzlösung

EASYCRIC NOTFALL-KONIOTOMIESET MIT TUBUS (Art. Nr. 120605)

BESTELL-GRÖSSE	ID HINTER HALTE-PLATTE	I.D. AN SPITZE	A.D. HINTER HALTEPLATTE	A.D. AN SPITZE	L (MITTEL-LINIE)	A	B	C	GESAMT-LÄNGE	WINKEL	VE
5.0	6.0 mm	5.0 mm	8.5 mm	5.8 mm	70.0 mm	0 mm	0 mm	70.0 mm	95.0 mm	66.9°	1


EINFÜHRUNGSDILATATOR

I.D. AN GRIFF	I.D. AN SPITZE	A.D. AN SPITZE	LÄNGE HINTER GRIFF BIS SPITZE	GESAMTLÄNGE	WINKEL
3.0 mm	1.5 mm	2.0 mm	125.0 mm	130.0 mm	66.9°

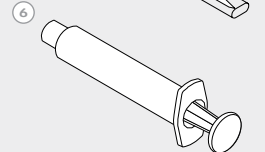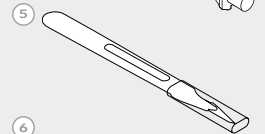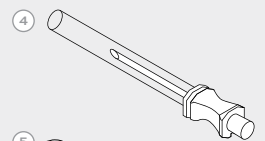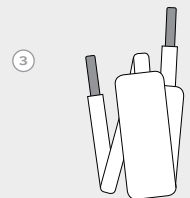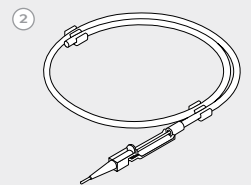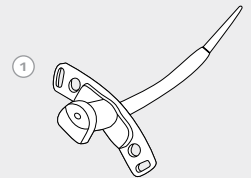

Blauer Dilatator mit ergonomisch geformtem Griffbereich für eine sicherere Handhabung.

MASSE NACH DIN EN ISO 5366-1

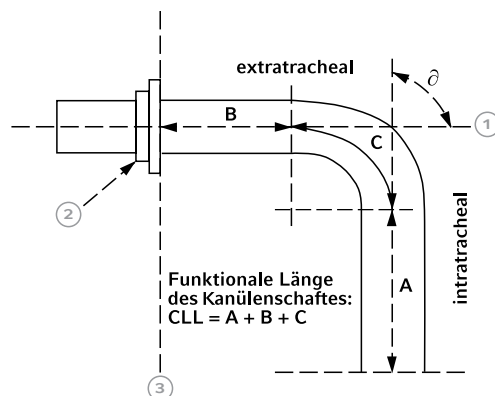

- ① Mittellinie
- ② Halteplatte
- ③ Bezugsebene

VERTRIEB DURCH:

TELEFLEX MEDICAL ZENTRALE EMEA, IRLAND · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Athlone · Co Westmeath

Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

DEUTSCHLAND Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com

ÖSTERREICH Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com

SCHWEIZ Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com

WWW.TELEFLEX.COM

94 06 37 · 00 00 00 · REV A · 10 12 02 · Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.

Teleflex