

Arrow

# Catéter para HD crónica

## Directrices para cuidado de la zona



Cannon II Plus



Arrow Edge

NextStep  
AnterógradoNextStep  
Retrógrado

Arrow VectorFlow

### Cuidado y mantenimiento del catéter

Para un mejor cuidado del catéter de hemodiálisis crónica de Arrow, cumpla las siguientes directrices:

- Alcohol y soluciones que contienen alcohol (p. ej. Hibiclens, ChlorPrep), las soluciones con base de yodo (p. ej. povidona yodada), las pomadas con base de PEG (p. ej. Bactroban) y el peróxido de hidrógeno o ExSept Plus pueden ser utilizados con estos catéteres.
- Antes de aplicar vendajes oclusivos, hay que asegurarse de que la solución se ha secado por completo.
- Evitar el uso excesivo o prolongado de soluciones o pomadas alcohólicas para limpiar el catéter o para el cuidado de la zona.
- No utilizar acetona con estos catéteres, ya que dicha sustancia podría degradarlos.
- Limpiar la piel que rodea al catéter con antisépticos no perjudiciales para la piel. Cubrir la zona de salida con vendaje oclusivo estéril durante todo el proceso de implantación. Si se produce un edema en el lugar del catéter, dejar de utilizarlo y sustituirlo por otro.

### Heparinización

Para mantener la permeabilidad del catéter entre tratamientos, debe crearse un bloqueo con heparina en cada uno de los lúmenes del catéter. La concentración de heparina utilizada debe determinarse según el protocolo hospitalario. Si el catéter no se va a utilizar, se recomienda purgarlo y volverlo a embalar con heparina cada 48-72 horas.

### Entorno de resonancia magnética

El set retrógrado NextStep, el Cannon II Plus y ARROW-Clark VectorFlow tienen una compatibilidad condicional con RM. Consulte las instrucciones de uso para obtener más detalles.

### Compatibilidad de antisépticos para el cuidado de la zona<sup>1</sup>

AGENTES ANTISÉPTICOS	CANNON II PLUS <sup>1</sup>	ARROW EDGE	NEXTSTEP ANTERÓGRADO	NEXTSTEP RETRÓGRADO	VECTOR-FLOW
ExSept Plus	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Povidona yodada <sup>2,3</sup>	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Betadine	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tintura de yodo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Soluciones con alcohol <sup>2,3</sup>	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ChlorPrep <sup>2,3</sup>	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Alcohol isopropílico (IPA) <sup>2,3</sup>	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Hibiclens	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Peróxido de hidrógeno	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bactroban <sup>2,3</sup>	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Pomada de povidona yodada <sup>2,3</sup>	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Pomadas PEG	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Acetona	No	No	No	No	No

<sup>1</sup> Datos de las pruebas in-vitro disponibles bajo pedido.

<sup>2</sup> Centers for Disease Control and Prevention "Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections," August 9, 2002, Volume 51.

<sup>3</sup> National Kidney Foundation. NKF-K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Vascular Access: update 2000. Am J Kidney Dis 2001; 37 (supl): S137-S81.

\* Patente de los EE. UU. n.º 6.638.242

Advertencia: La ley federal (EE.UU.) restringe la venta de este dispositivo a personal médico o por prescripción facultativa.

Bactroban es una marca registrada de GlaxoSmithKline. ChlorPrep es una marca registrada de CareFusion Corporation o de una de sus filiales.

ExSept Plus es una marca registrada de Alcavis HDC, LLC o de una de sus filiales. Hibiclens está registrado a nivel mundial a una o más empresas pertenecientes al grupo empresarial Mölnlycke Health Care. Arrow, Cannon, NextStep, Edge y Teleflex son marcas comerciales o marcas registradas de Teleflex Incorporated o de sus afiliadas, nos EUA e/ou noutros países. La información de este documento no sustituye las Instrucciones de Utilización del producto. Los productos de este catálogo pueden no estar disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su representante local. Toda la información está actualizada en el momento de la impresión (12/2016). Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso. ©2016 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados.

94 11 42 - 00 00 03 - REV A - MC/SF - 12 16 01

Distribuido por:

Oficinas centrales de Teleflex, Irlanda · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Dublin Road · Athlone · Co Westmeath

Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

España · Tel. +34 918 300 451 · info.es@teleflex.com

www.teleflex.com

Teleflex