



RÜSCH TRACFLEX PLUS

La nouvelle génération de canules de trachéotomie de première qualité

APERCU

- Matériaux thermosensibles hautement flexibles
- Canule de trachéotomie réutilisable avec armature spiralée pour un seul patient
- Prévention des infections grâce à une chemise interne spéciale à usage unique*
- Codage couleur sur la collerette de fixation de la canule de trachéotomie et sur le bord cranté de la chemise interne pour une identification sûre de la taille
- Large éventail d'accessoires : gel lubrifiant, capuchon « toux », capuchon « douche » et capuchon de sevrage (optionnel), dispositif d'aide à l'insertion, chemises internes, lanière de fixation confortable
- Carte patient
- Adaptation optimale : collerette de fixation de la canule réglable avec système de verrouillage
- Stérile, sans latex, sans DEHP

* Brevet en cours

LE PETIT « PLUS » EN MATIERE DE CONFORT

Nos canules de trachéotomie TracFlex Plus appartiennent à la dernière génération de produits haut de gamme de la marque RÜSCH. Elles vous offrent ce petit « plus » en matière de confort, de sécurité et de performance lors de la prise en charge de patients trachéotomisés.

Les matériaux soigneusement sélectionnés pour leur extrême souplesse et leur flexibilité, associés à une gamme d'accessoires parfaitement adaptés garantissent un confort optimal et une qualité irréprochable. Les extrémités arrondies des canules et le dispositif d'aide à l'insertion assurent une introduction de la canule dans le plus grand confort pour le patient et sans risque de lésion pour la trachée.

La canule s'adapte parfaitement à l'anatomie de chaque individu.

LA SECURITE AVANT TOUT

La collerette de fixation réglable et son système de verrouillage très simple permettent d'adapter et de sécuriser le dispositif autour du cou

du patient. Les repères de marquage supplémentaires se trouvant sur la tige de la canule facilitent l'alignement de la lanière de fixation.

L'armature spiralée de la canule de trachéotomie garantit une flexibilité maximale et offre simultanément une protection contre les plicatures ou la compression.

Le ballonnet basse pression à paroi mince des sondes à ballonnet crée une étanchéité sûre et en douceur contre la trachée. De plus, le capuchon pré-monté de la valve d'étanchéité sécurise le ballonnet témoin.

EFFICACITE ET HAUTE PERFORMANCE

La chemise interne flexible à usage unique spécialement conçue pour nos canules de trachéotomie TracFlex Plus garantit un dégagement rapide et hygiénique des sécrétions. De cette manière, la lumière interne de la canule de trachéotomie est protégée contre la contamination et le risque d'infection est réduit au maximum.

CHOIX DE LA TAILLE

TracFlex Plus est disponible dans cinq tailles avec un DI (diamètre interne) compris entre 7,0 et 11,0 mm et garantit un rapport optimal diamètre interne de la canule de trachéotomie armée / diamètre externe de la chemise interne.

TRACFLEX PLUS SET (avec ballonnet, réf. 121903; sans ballonnet, réf. 121900)

RUSCH

| TAILLE | DI EN MM | DE EN MM | CLL* EN MM | DIM. A EN MM | DIM. B EN MM | DIM. C EN MM | ANGLE (APPROX.) | BALLONNET Ø EN MM ** | CHEMISE INTERNE | QTE |
|--------|----------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----|
| 7,0 | 7,0 | 10,1 | 102,5 | 37,0 | 22,8 | 42,7 | 100° | 23 | 7,0 | 2 |
| 8,0 | 8,0 | 11,1 | 122,5 | 40,0 | 25,4 | 57,1 | 100° | 27 | 8,0 | 2 |
| 9,0 | 9,0 | 12,1 | 152,5 | 44,0 | 26,4 | 82,1 | 100° | 30 | 9,0 | 2 |
| 10,0 | 10,0 | 13,1 | 157,5 | 44,0 | 34,0 | 79,5 | 100° | 32 | 10,0 | 2 |
| 11,0 | 11,0 | 14,2 | 163,5 | 47,0 | 33,1 | 83,4 | 100° | 34 | 11,0 | 2 |

* Longueur totale (CLL=A+B+C) ** uniquement pour le Kit TracFlex Plus 121903

TRACFLEX PLUS CHEMISES INTERNES (Réf. 121910)


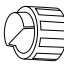

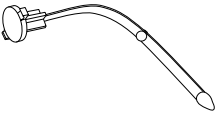
RUSCH

| TAILLE | DI EN MM | DE EN MM | QTE |
|--------|----------|----------|-----|
| 7,0 | 5,5 | 6,2 | 10 |
| 8,0 | 6,5 | 7,2 | 10 |
| 9,0 | 7,8 | 8,3 | 10 |
| 10,0 | 8,8 | 9,4 | 10 |
| 11,0 | 9,8 | 10,4 | 10 |



ACCESSOIRES


RUSCH

| | REF. | DÉSIGNATION | QTE |
|---|--------------|---|-----|
|  | 12 19 11 | Capuchon « douche » destiné aux canules TracFlex Plus contre les éclaboussures pour éviter l'inhalation de gouttelettes d'eau pendant le bain ou la douche | 4 |
|  | 12 19 12 | Capuchon « toux » destiné aux canules TracFlex Plus permettant d'éviter les projections de sécrétions ou d'expectorations | 4 |
|  | 12 19 13 | Capuchon de sevrage pour canules TracFlex Plus | 4 |
|  | 12 19 15 *** | Dispositif d'aide à l'insertion pour une introduction sûre et atraumatique de la canule de trachéotomie TracFlex Plus *** Lorsque vous commandez, veuillez toujours indiquer la taille du tube | 1 |

LORSQUE VOUS COMMANDEZ ; VEUILLEZ TOUJOURS INDIQUER LA REF. ET LA TAILLE

COMPOSANTS DU KIT

- 1 Canule de trachéotomie TracFlex Plus avec ou sans ballonnet basse pression et valve avec capuchon
- 2 2 chemises internes flexibles avec bords crantés codés couleur
- 3 Dispositif d'aide à l'insertion (obturateur)
- 4 Lanière de fixation confortable
- 5 Capuchon « douche »
- 6 Capuchon « toux »
- 7 Capuchon de sevrage (optionnel)
- 8 Gel lubrifiant hydrosoluble, sachet de 3g
- 9 Carte patient pour canule de trachéotomie

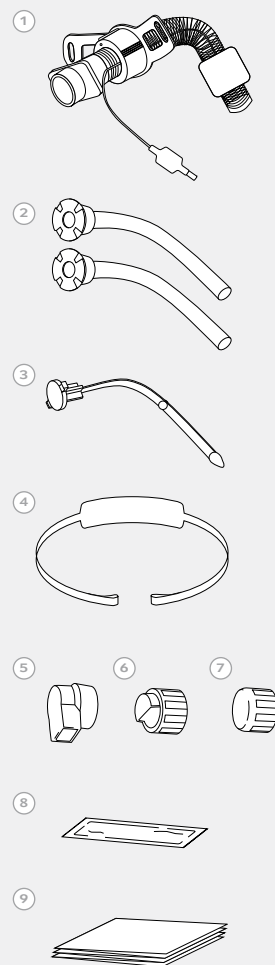

TELEFLEX MEDICAL SIEGE SOCIAL, IRLANDE · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Athlone · Co Westmeath
Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflexmedical.com
FRANCE Tél. +33 (0)5 62 18 79 40 · info.teleflexmedical.france@teleflexmedical.com
BELGIQUE Tél. +32 (0)2 333 24 60 · info.be@teleflexmedical.com
SUISSE Tél. +41 (0)31 818 40 90 · switzerland@teleflexmedical.com
WWW.TELEFLEX.COM

94 05 58 - 00 00 02 - REV A - 04 11 01 · Toutes les informations communiquées dans ce document sont exactes au moment de l'impression. Elles peuvent faire l'objet de modification technique sans préavis.

teleflex