


Einführen der manuellen Nadel


Schritt 1: Punktionsort lokalisieren.



Schritt 2: Punktionsort vorbereiten.

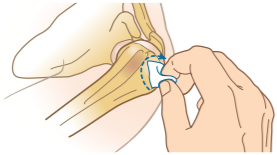


Schritt 3: Einführen.

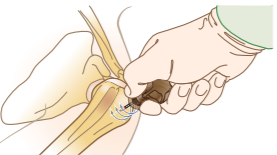

Schritt 4:


Mandrin entfernen und im NeedleWISE platizieren.

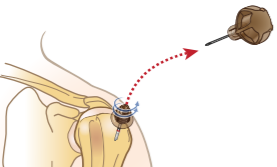

Schritt 5:

EZ-Stabilizer-Pflaster auf den Katheteranschluss aufsetzen.


Das hier dargestellte EZ-Stabilizer-Pflaster wird einzeln verkauft und ist nicht im Lieferumfang des EZ-IO T.A.L.O.N.-Nadelsets enthalten.

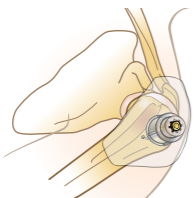

Schritt 6:

Gespülte EZ-Connect-Anschlussleitung am Luer-Lock-Anschluss des Katheters anbringen. Katheter mit 5-10 ml isotonischer Kochsalzlösung spülen.

Bei schmerzempfindlichen Patienten kann die Gabe von 2-%igem Lidocain ohne Konservierungsmittel oder Epinephrin (intravenöses Lidocain) vor dem Spülen in Erwägung gezogen werden.

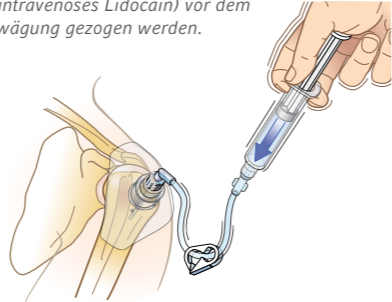

Entfernen der manuellen Nadel

EZ-Connect-Anschlussleitung und EZ-Stabilizer-Pflaster vom Katheteranschluss entfernen.


Luer-Lock Spritze anbringen und Spritze und Katheter im Uhrzeigersinn mit leichtem Zug nach oben drehen, um den Katheter herauszuziehen.

Dabei nicht am Katheter zerrn oder diesen biegen.



Bestellinformationen

EZ-IO T.A.L.O.N. Nadelset

ART. NR.	NSN	VE
9081-VC-006	#6515-01-626 6395	1
BESCHREIBUNG		GRÖSSE
	Manuelle 38,5 mm-IO-Nadel • Latexfrei • Edelstahl 304	15G (1,8 mm) × 38,5 mm lang
	Sternum-Positionierungshilfe • Latexfrei • Edelstahl 304	16G (1,65 mm) × 23,6 mm lang

Jedes Nadelset enthält eine manuelle IO-Nadel, eine Sternum-Positionierungshilfe, eine EZ-Connect-Anschlussleitung, eine Kurzanleitung, einen NeedleWISE 1-Port-Halter und ein Patientenarmband.

Das EZ-Stabilizer-Pflaster wird einzeln verkauft und ist nicht im Lieferumfang des EZ-IO T.A.L.O.N.-Nadelsets enthalten.

Zusätzliches Zubehör

ART. NR.	VE	
9066-VC-005	1	
BESCHREIBUNG		GRÖSSE
	EZ-Stabilizer-Pflaster	14,6 × 13,3 × 3,2 cm (5,75" × 5,25" × 1,25") Gewicht: 17 g

Unternehmenssitz

Tel. +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, USA

Regionalniederlassungen

USA: Tel. +1 919 544 8000, gebührenfrei 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

Lateinamerika: Tel. +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

International: Tel. +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business Park and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irland

Weitere Informationen erhalten Sie auf teleflex.com.

NeedleWISE ist ein Produkt von Atrion Medical Products Inc. Teleflex, das Teleflex Logo, EZ-IO T.A.L.O.N., EZ-Connect und EZ-Stabilizer sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von Teleflex Incorporated oder dessen Tochterunternehmen, die in den USA und/oder anderen Ländern registriert sind.

Die Informationen in diesem Dokument ersetzen nicht die Gebrauchsanweisung für das Produkt. Die Produkte in diesem Katalog sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertreter. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung (05/2017). Technische Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten. © 2017 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

94 07 88 - 00 00 00 · REV A · MC / SF · 05 17 02



Arrow
EZ-IO T.A.L.O.N.
Zugang zu sieben IO-Punktionsstellen mit einem manuellen Gerät

EZ-IO T.A.L.O.N.


Nadelset-Produktsystem für die Anwendung beim Militär



Einführen und Entfernen der manuellen Nadel am Sternum


Schritt 1:

Punktionsort lokalisieren.

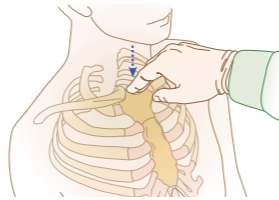


Schritt 2:

Nadelkappe des Sternum-Positionierungshilfe entfernen und an Lasche 1 ziehen. Die gebogene Einkerbung an der Oberseite der Sternum-Positionierungshilfe an der Drosselrinne ausrichten.

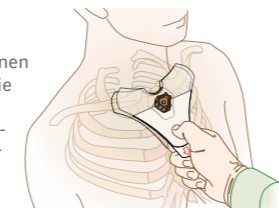

Schritt 3:

Die Tiefensonden der Sternum-Positionierungshilfe mit festem und gleichmäßigem Druck auf dem Sternum positionieren. Sternum-Positionierungshilfe festhalten, Lasche 2 ziehen, um die Klebefläche an der unteren Hälfte der Sternum-Positionierungsfläche freizulegen, und auf der Haut befestigen.

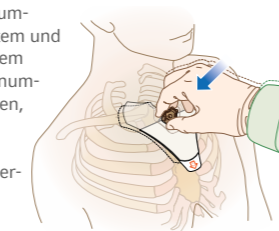

Schritt 4:

Sicherheitskappe der manuellen IO-Nadel entfernen und entsorgen.




Wichtig:

Vor dem Einführen sicherstellen, dass der Mandrin fest mit dem Katheter verbunden ist.

Schritt 5:

Einführen.

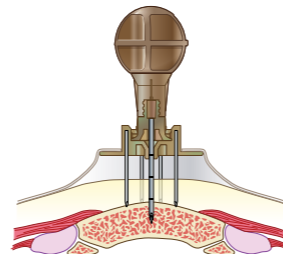

- Manuelle IO-Nadelspitze in den Innenring in der Mitte der Sternum-Positionierungshilfe einführen; die Nadel muss im 90 Grad-Winkel zum Knochen sein.
- Vorsichtig einführen, bis die Spitze der manuellen IO-Nadel den Knochen berührt.
- Knochenrinde durch Drehen im Uhrzeigersinn mit sanftem, gleichmäßigem Druck nach unten durchstechen.
- Bei Eintritt in den Markraum den Einführvorgang stoppen. Beim Einrasten des Anschlusses der manuellen IO-Nadel in den Anschluss der Sternum-Positionierungshilfe ist ein Klicken zu spüren oder zu hören.
- Den Anschluss der manuellen IO-Nadel festhalten und den Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Mandrin zu entfernen. Die Nadel sollte sich fest im Knochen sitzend anfühlen (erste Bestätigung der Platzierung).
- Mandrin im NeedleWISE platzieren.

Während des Einführens der manuellen IO-Nadel weder an der Nadel noch an der Positionierungshilfe zerren oder diese biegen. Immer einen 90-Grad-Winkel beibehalten.

Schritt 6:

Gespülte EZ-Connect-Anschlussleitung anbringen und befestigen.

Katheter mit 5-10 ml isotonischer Kochsalzlösung spülen.

Bei schmerzempfindlichen Patienten kann die Gabe von 2-%igem Lidocain ohne Konservierungsmittel oder Epinephrin (intravenöses Lidocain) vor dem Spülen in Erwägung gezogen werden.




Schritt 7:

Den Bolus gegebenenfalls wiederholen.

Flüssigkeiten oder Medikamente mit Druck wie angegeben verabreichen.

Hinweis:

Beim Transfer/Transport die Komponenten am Patienten sichern.

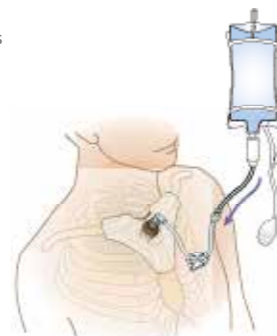

Entfernen der manuellen Nadel vom Sternum

EZ-Connect-Anschlussleitung vom Katheteranschluss entfernen. Befestigungspflaster der Sternum-Positionierungshilfe von der Brust abziehen und Luer-Lock Spritze anbringen.

Spritze und Katheter im Uhrzeigersinn mit leichtem Zug nach oben drehen, um den Katheter herauszuziehen.

Beim Entfernen nicht am Katheter zerren oder diesen biegen.

Katheter und Sternum-Positionierungshilfe im NeedleWISE platzieren.

