

DOUBLE D BEATMUNGSSYSTEM

Zwei in einem: erstklassiges Beatmungssystem für Narkose und Beatmung

AUF EINEN BLICK

- zwei in einem: Inspirations- und Expirationsteil in einem Schlauch
- geringere Compliance des Beatmungssystems: höhere Volumenzufuhr
- leichter: mehr Patientenkomfort durch geringeres Gewicht der Schläuche
- weniger Materialaufwand: umweltfreundlichere Entsorgung
- für Erwachsene, Kinder und Säuglinge geeignet
- biegsame Anschlussmuffen passen gut auf die Maschinenanschlüsse
- latexfrei, DEHP-frei
- zum Einmalgebrauch
- clean

WENIGER IST MEHR

Ein Schlauch, zwei Funktionen: Bei unserem Double D Beatmungssystem sind Inspirations- und Expirationsteil in einem Schlauch zusammengefasst. Die beiden Schenkel haben eine gemeinsame Wand, sodass es zu einem Wärmeaustausch kommt. Auf diese Weise werden die zugeführten Atemgase automatisch von den ausgeatmeten Gasen im Expirationsteil erwärmt (4,0 °C bei einem Fluss von 10 l/Min). Dies ermöglicht stets eine optimale Beatmung. Außerdem stabilisiert die Wand im Beatmungssystem das System ohne Verlust an Biegsamkeit und Compliance.

LEICHT UND KOMFORTABEL

Durch den Wegfall eines zweiten Schlauchs wiegt das System weniger als herkömmliche Beatmungssysteme und koaxiale Schlauch-in-Schlauch-Systeme. Dies ist für den Patienten komfortabler, da weniger Zug auf das Beatmungssystem ausgeübt wird. Gleichzeitig lässt sich das System durch den geringeren Materialaufwand umweltfreundlicher entsorgen.

EINFACH UND EFFIZIENT


Das System ist sehr einfach und benutzerfreundlich. Da nur ein Schlauch vorhanden ist, gibt es im OP und auf der Intensivstation kein Schlauchgewirr.

Effizienz, Patientenkomfort und Zweckmäßigkeit sind die entscheidenden Vorteile von Teleflex Double D



DOUBLE D BESCHREIBUNG

Integriertes Narkose- und Beatmungssystem mit Winkelverbinder und LL-Anschluss für Kapnometrie

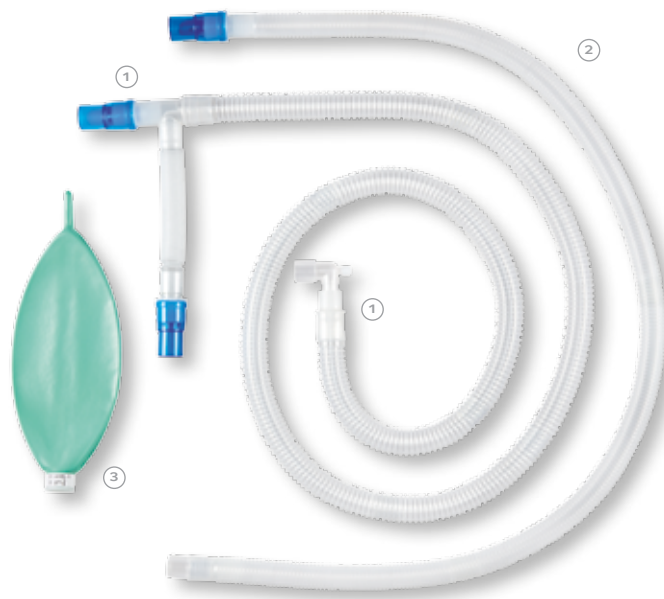

- ① Double D Beatmungssystem
- ② Zusatzschlauch
- ③ Latexfreier Beutel (2 l)

DOUBLE D

ART. NR.	LÄNGE	ZUSÄTZLICHER SCHLAUCH	BEATMUNGS-BEUTEL	PACKUNG	GESAMT-GEWICHT	WÄRME-WIRKUNGS-GRAD**	COMPLIANCE BEI 100 CMH ₂ O PRO METER SCHLAUCHLÄNGE***	QTY
198881-001800	180 cm	–	–	clean	< 250 gr	4,0°C / 3,7°C	1,1 ml/cmH ₂ O	20
198886-001800	180 cm	120 cm	2L latexfrei	clean	< 250 gr ¹	4,0°C / 3,7°C	1,1 ml/cmH ₂ O	20
198886-001801	180 cm	150 cm	2L latexfrei	clean	< 250 gr ²	4,0°C / 3,7°C	1,1 ml/cmH ₂ O	20
198886-031800	180 cm	300 cm ausziehbar	2L latexfrei	clean	< 250 gr ³	4,0°C / 3,7°C	1,1 ml/cmH ₂ O	20
198886-051800	180 cm	100 cm mit flexiblen Konnektoren	–	clean	< 250 gr ⁴	4,0°C / 3,7°C	1,1 ml/cmH ₂ O	20
198881-002800	280 cm	–	–	clean	< 440 gr	5,4°C / 4,5°C	1,9 ml/cmH ₂ O	20
198886-032800	280 cm	300 cm ausziehbar	2L latexfrei	clean	< 440 gr ³	5,4°C / 4,5°C	1,9 ml/cmH ₂ O	20

* Gewicht ohne Zubehör

** bei 10 l/Min Durchflussrate in den ersten 20 Minuten (Netto-Temperaturanstieg)

*** Messung gemäß ISO 5367 bei einem Druck von 100 cmH₂O

¹ Gewicht Zubehör – 130 gr

² Gewicht Zubehör – 145 gr

³ Gewicht Zubehör – 185 gr

⁴ Gewicht Zubehör – 100 gr

Inspiratorischer und expiratorischer Widerstand bei verschiedenen Durchflussraten (cmH₂O)

DURCHFLUSS	DOUBLE D 180 CM		DOUBLE D 280 CM	
	INSPIRATORISCHER WIDERSTAND	EXPIRATORISCHER WIDERSTAND	INSPIRATORISCHER WIDERSTAND	EXPIRATORISCHER WIDERSTAND
10 l/min	0,16 cmH ₂ O	0,17 cmH ₂ O	0,21 cmH ₂ O	0,23 cmH ₂ O
20 l/min	0,49 cmH ₂ O	0,52 cmH ₂ O	0,69 cmH ₂ O	0,76 cmH ₂ O
30 l/min	1,20 cmH ₂ O	1,26 cmH ₂ O	1,49 cmH ₂ O	1,56 cmH ₂ O
40 l/min	2,27 cmH ₂ O	2,34 cmH ₂ O	2,65 cmH ₂ O	2,76 cmH ₂ O
50 l/min	3,37 cmH ₂ O	3,44 cmH ₂ O	4,14 cmH ₂ O	4,37 cmH ₂ O
60 l/min	4,60 cmH ₂ O	4,69 cmH ₂ O	5,75 cmH ₂ O	6,17 cmH ₂ O

Messung gemäß ISO 5367

Teleflex, das Teleflex Logo und Double D sind Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder dessen Tochterunternehmen, die in den USA und/oder anderen Ländern registriert sind. Die Informationen in diesem Dokument ersetzen nicht die Gebrauchsanweisung für das Produkt. Die Produkte in diesem Katalog sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie ihren lokalen Vertreter. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung (04/2017). Technische Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten. © 2017 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. 94 05 93 - 00 00 00 · MC/SF · REV B · 04 17 01

Teleflex

Vertrieb durch: Teleflex Headquarters International, Irland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Deutschland Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com
Österreich Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com
Schweiz Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com
www.teleflex.com