


TrapLiner[™]
catheter

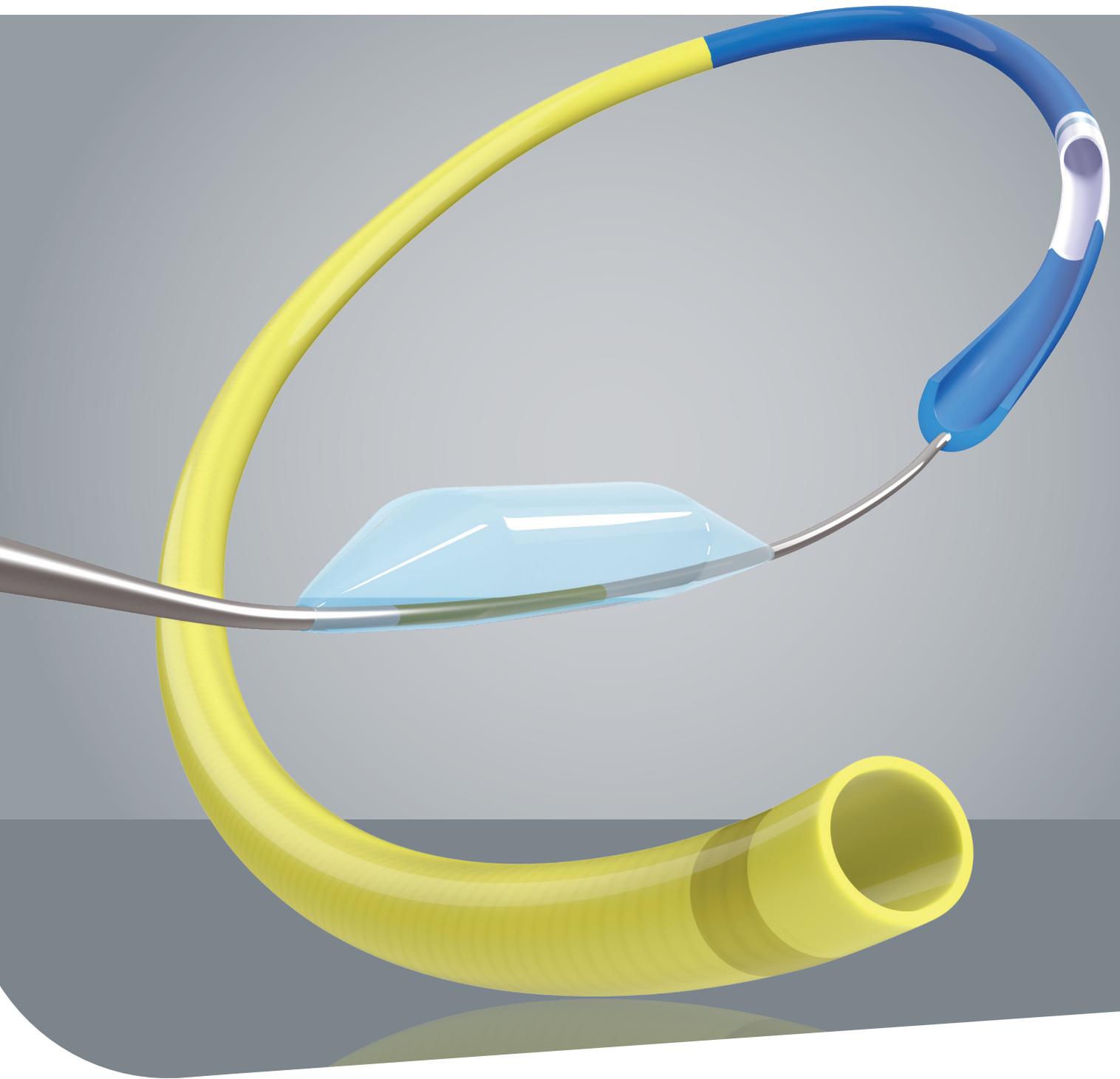

Catéter TrapLiner[®]

Extensión de Guía y Atrapamiento del Alambre


Teleflex[®]

Información General de la Comparación de Funciones

Catéter TrapLiner®

○ 6 Fr.
 ○ 7 Fr.
 ○ 8 Fr.



Extensión de guía avanzada de hasta 10 cm

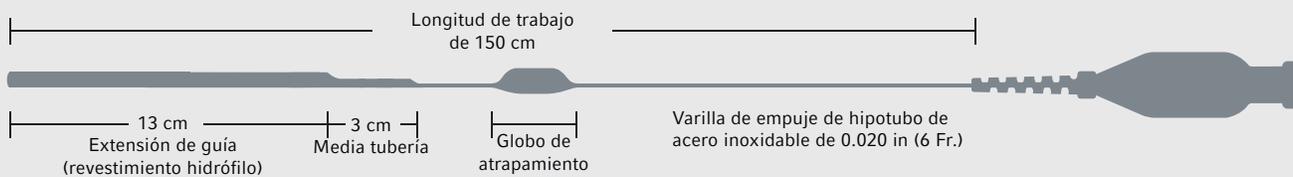

Catéter GuideLiner® V3

○ 5 Fr.
 ○ 5.5 Fr.
 ○ 6 Fr.
 ○ 7 Fr.
 ○ 8 Fr.

Extensión de guía avanzada de hasta 10 cm

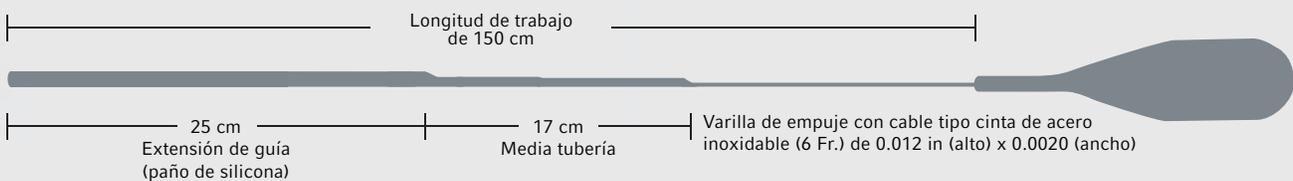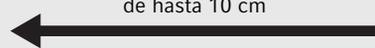

Dispositivo 2 en 1

Catéter de Extensión de Guía con Capacidades de Atrapamiento


El catéter TrapLiner® es un catéter de extensión de guía de intercambio rápido que combina la capacidad de proporcionar soporte de respaldo con la capacidad de atrapar una guía de 0.014 in contra la pared interna de un catéter guía. Esta funcionalidad ayuda a prevenir la pérdida de la posición de la guía o el desplazamiento involuntario de la guía durante el intercambio de catéteres y elimina la necesidad de técnicas alternativas de intercambio de catéteres.

Beneficios Clínicos de la Extensión de Guía

Proporciona alineación coaxial y asentamiento profundo para:

- Soporte de refuerzo adicional
- Suministro del dispositivo distal
- Suministro de medios de contraste selectivos



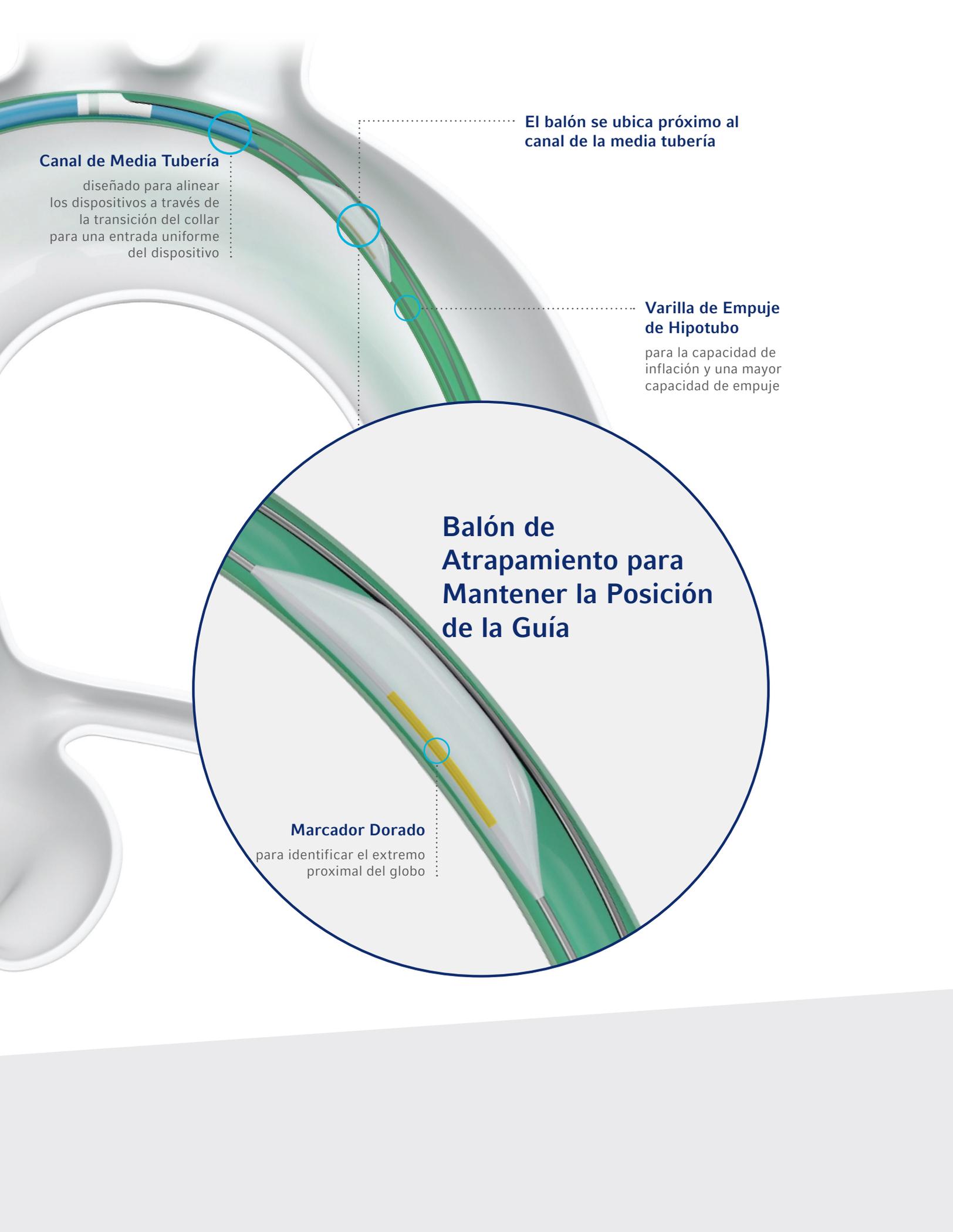

Canal de Media Tubería

diseñado para alinear los dispositivos a través de la transición del collar para una entrada uniforme del dispositivo

El balón se ubica próximo al canal de la media tubería

Varilla de Empuje de Hipotubo

para la capacidad de inflación y una mayor capacidad de empuje

Balón de Atrapamiento para Mantener la Posición de la Guía

Marcador Dorado

para identificar el extremo proximal del globo


Información para Pedidos

Catéter TrapLiner®

El Catéter TrapLiner® está diseñado para su uso junto con catéteres guía para acceder a regiones discretas de la vasculatura coronaria o periférica, facilitar la colocación de dispositivos intervencionistas y facilitar el intercambio de un dispositivo intervencionista manteniendo la posición de una guía dentro de la vasculatura.

MODELO	TAMAÑO	TAMAÑO DE CATÉTER GUÍA MÍNIMO	TAMAÑO DE CATÉTER GUÍA MÁXIMO	D. E. DE VARILLA DE EMPUJE	D. I. DE EXTENSIÓN DE GUÍA	D. E. DE EXTENSIÓN DE GUÍA	LONGITUD DE INTERCAMBIO RÁPIDO	VALOR NOMINAL DE PRESIÓN	PRESIÓN NOMINAL DE ROTURA
5566	6 Fr.	6 Fr. (0.070 in / 1.78 mm D. I.)	8 Fr. (0.091 in / 2.31 mm D. I.)	0.020 in (0.51 mm)	0.056 in (1.42 mm)	5.1 Fr. (1.70 mm / 0.067 in)	13 cm	12 atm / 1216 kPa	14 atm / 1419 kPa
5567	7 Fr.	7 Fr. (0.078 in / 1.98 mm D. I.)	8 Fr. (0.091 in / 2.31 mm D. I.)	0.025 in (0.64 mm)	0.062 in (1.57 mm)	5.7 Fr. (1.90 mm / 0.075 in)	13 cm	12 atm / 1216 kPa	14 atm / 1419 kPa
5568	8 Fr.	8 Fr. (0.088 in / 2.24 mm D. I.)	8 Fr. (0.091 in / 2.31 mm D. I.)	0.025 in (0.64 mm)	0.071 in (1.80 mm)	6.5 Fr. (2.16 mm / 0.085 in)	13 cm	12 atm / 1216 kPa	14 atm / 1419 kPa

Empaquetado en cantidades de 1 unidad por caja.

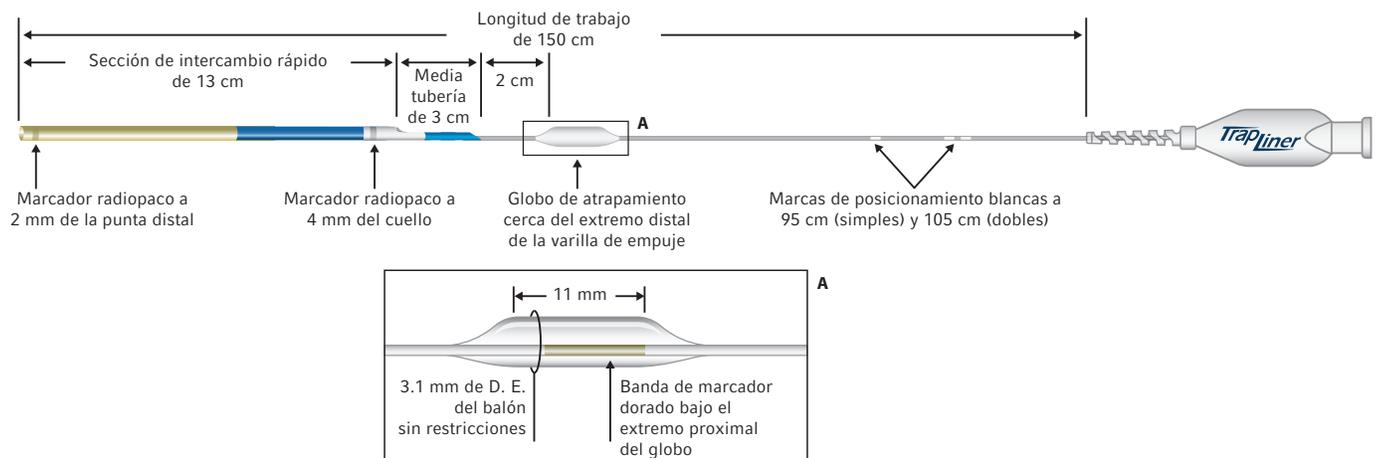

Teleflex es un proveedor mundial de tecnologías médicas diseñadas para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Aplicamos innovaciones basadas en objetivos –una búsqueda incansable para identificar necesidades clínicas no cubiertas– para beneficiar a los pacientes y a los proveedores de asistencia sanitaria. Nuestra cartera es variada, con soluciones para los campos de acceso vascular y de intervención, cirugía, anestesia, atención cardíaca, urología, servicios de urgencias y atención respiratoria. Los empleados de Teleflex en todo el mundo están unidos por la convicción de que sus tareas cotidianas marcan una diferencia. Si precisa más información, visite teleflex.com.

Teleflex es el responsable de Arrow®, Deknatel®, Hudson RCI®, LMA®, Pilling®, Rüsck® y Weck®, marcas de confianza unidas por la percepción de un objetivo común.

Oficina Corporativa

Teléfono: +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, EE. UU.

Oficinas Regionales

Estados Unidos: Teléfono: +1 919 544 8000, Número gratuito: 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, EE. UU.

Latinoamérica: Teléfono +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, EE. UU.

Internacional: Teléfono +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irlanda

Alemania: +49 (0)7151 406 0

Australia/Nueva Zelanda 1300 360 226

Austria: +43 (0)1 402 47 72

Bélgica: +32 (0)2 333 24 60

Canadá: +1 (0) 905 943 9000

China (Pekín): +86 (0)10 6418 5699

China (Shangái): +86 (0)21 6163 0965

Corea: +82 2 536 7550

Eslovaquia: +421 (0)3377 254 28

España: +34 918 300 451

Francia: +33 (0)5 62 18 79 40

Grecia: +30 210 67 77 717

India: +91 (0)44 2836 5040

Italia +39 0362 58 911

Japón: +81 (0)3 6632 3600

México: +52 55 5002 3500

Países Bajos: +31 (0)88 00 215 00

Portugal: +351 22 541 90 85

Reino Unido: +44 (0)1494 53 27 61

República Checa: +420 (0)495 759 111

Singapur (SEA, países sin ventas directas) +65 6439 3000

Sudáfrica: +27 (0)11 807 4887

Suiza: +41 (0)31 818 40 90

Si precisa más información, visite teleflex.com.

Consulte las Instrucciones de Uso para ver una lista completa de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. PRECAUCIÓN: Las leyes federales de los Estados Unidos restringen la venta de este dispositivo por parte de un médico clínico o por pedido de este.

Teleflex, the Teleflex logo, GuideLiner, TrapLiner, Arrow, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsck y Weck son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o sus afiliadas, en los Estados Unidos o en otros países.

La información incluida en este material no sustituye las Instrucciones de Uso del producto. No todos los productos están disponibles en todos los países. Comuníquese con su representante local. Revisado: 05/2018.

© 2018 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. MC-005714 LA ES