


GUÍA DE PROCEDIMIENTOS: CIRUGÍA GENERAL


Colecistectomía laparoscópica tradicional

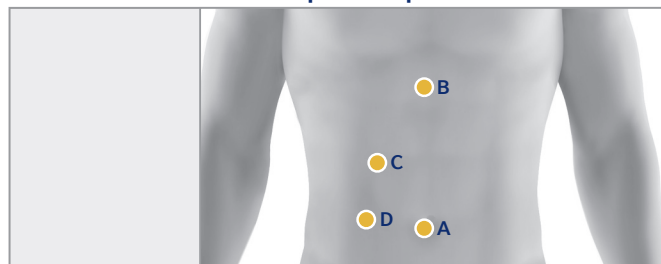

PUERTO / INSTRUMENTO

PUERTOS: Puertos de 5 mm o 10 mm para laparoscopia / instrumentos

Colecistectomía MiniLap

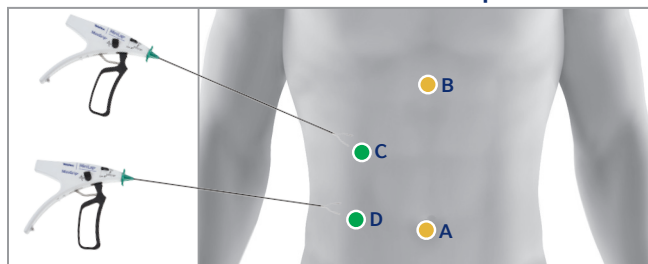


PUERTO / INSTRUMENTO

PUERTOS A / B: Puertos de 5 mm o 10 mm para laparoscopia / instrumentos

PUERTOS C / D: Pinza MiniGrip® para manipulación y retracción

Colecistectomía de 2x3 MiniLap y MiniPolar

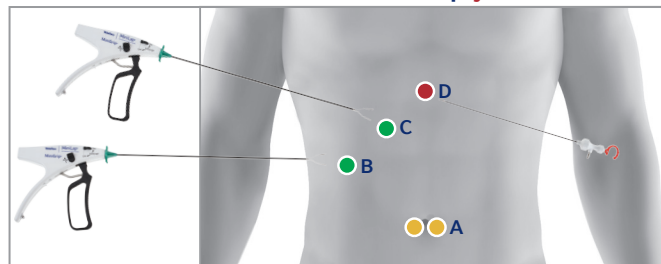

PUERTO / INSTRUMENTO


INSTRUMENTOS: Laparoscopia, aplicador de clip, bolsa

PUERTO A: Puertos de 5 mm o 10 mm para instrumentos

PUERTOS B / C: Pinza MiniGrip® para manipulación y retracción

PUERTOS D: Punta MiniPolar™ para cauterización y disección

Apendicectomía de 2 x 2 MiniLap

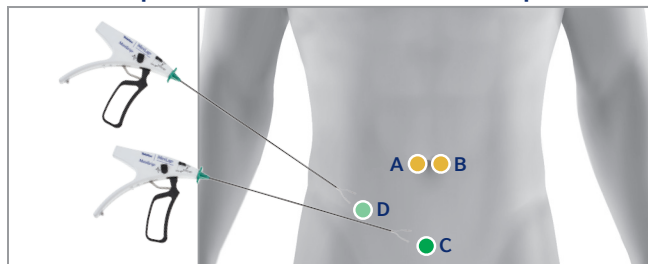

PUERTO / INSTRUMENTO

PUERTOS A / B: Puertos de 5 mm o 10 mm para laparoscopia / instrumentos

PUERTO C: Pinza MiniGrip® para manipulación del apéndice

PUERTO D: Pinza MiniGrip®, alternativa al Puerto C

COMPARACIÓN DE PUERTOS



CUERPO 2.4 MM


permite la inserción directa a través de la piel, dejando una cicatriz mínima.

Las mandíbulas presentan una apertura de hasta 12.5 mm



GUÍA DE PROCEDIMIENTOS: CIRUGÍA GINECOLÓGICA

Procedimientos ginecológicos avanzados de 2 puertos Ooforectomía, histerectomía, miomectomía

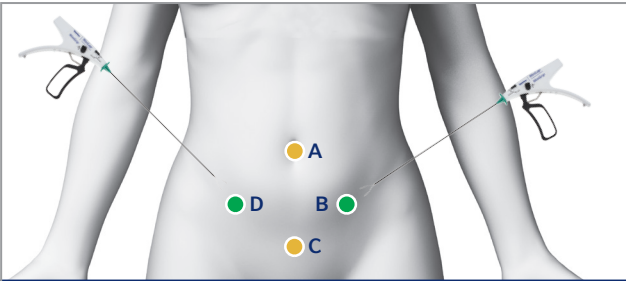


PUERTO / INSTRUMENTO

PUERTO A: Puertos de 5 mm o 10 mm para laparoscopia

PUERTOS B / D: Pinza MiniGrip® para manipulación y retracción

PUERTO C: Dispositivo e instrumentos mecánicos

Escisión de 1x2 de MiniLap de endometriosis/adhesiolisis

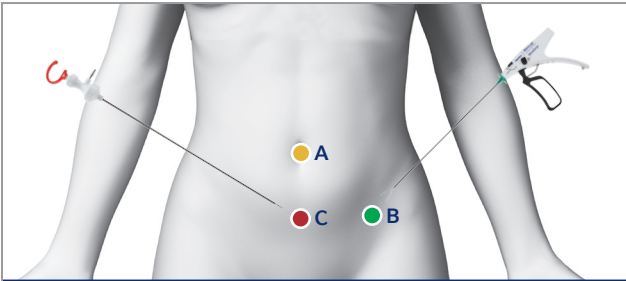


PUERTO / INSTRUMENTO

PUERTO A: Puertos de 5 mm o 10 mm para laparoscopia

PUERTOS B: Pinza MiniGrip® para manipulación y retracción

PUERTO C: Punta MiniPolar™ para la ablación de tejido endometrial

Extirpación laparoscópica de quiste ovárico

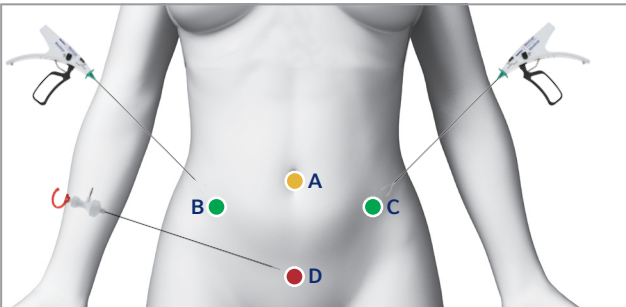


PUERTO / INSTRUMENTO

PUERTO A: Puerto de 5 mm o 10 mm para laparoscopia
Segundo puerto opcional para instrumentos

PUERTOS B / C: Pinza MiniGrip® para manipulación y retracción

PUERTO D: Punta MiniPolar™ utilizada para cauterización y disección

Ligadura de trompas

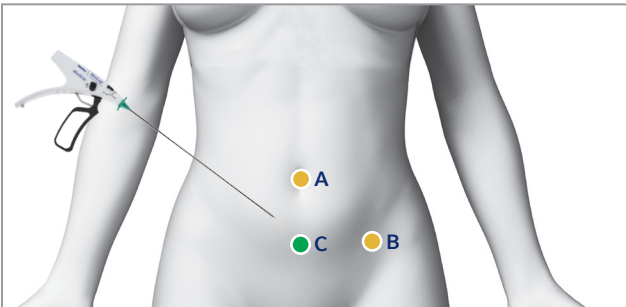


PUERTO / INSTRUMENTO

PUERTOS A / B: Puertos de 5 mm o 10 mm para laparoscopia / instrumentos

PUERTO C: Pinza MiniGrip® para sujetar las trompas de Falopio

SISTEMA MINILAP® CON MANGO MINIGRIP®

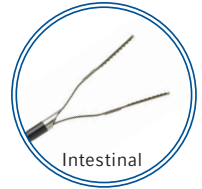

PINZAS PERCUTANEAS MINILAP®



PUNTAS ELECTROQUIRÚRGICAS MINIPOLAR™



PARA ORDENAR, LLAME A SERVICIO A CLIENTES AL +1.919.433.4999

Teleflex, MiniLap y MiniPolar son marcas comerciales de Teleflex Incorporated o sus afiliadas, registradas en los Estados Unidos y otros países.
© 2015 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. LA MC-000827 Rev 1 ES

Teleflex®

TELEFLEX LATIN AMERICA 3015 Carrington Mill Boulevard Morrisville, NC 27560 USA
For product information please contact la.cs@teleflex.com or +1.919.433.4999
TELEFLEX.COM