


GUIA DE PROCEDIMENTO – CIRURGIA GERAL


Colecistectomia laparoscópica tradicional

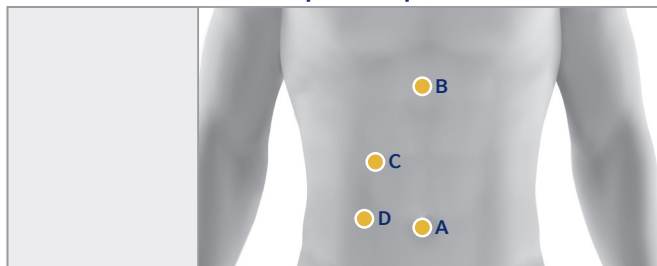

VIA/INSTRUMENTO

VIAS: trocateres de 5 mm ou 10 mm para laparoscópio / instrumentação

Colecistectomia com MiniLap

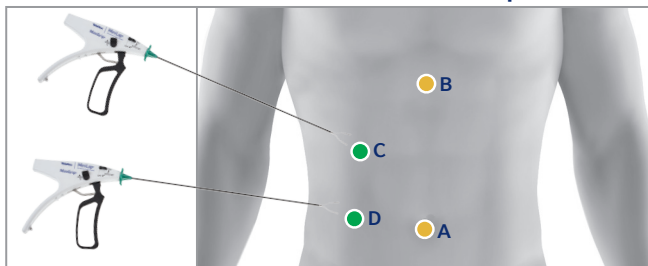


VIA/INSTRUMENTO

VIAS A/B: trocateres de 5 mm ou 10 mm para laparoscópio / instrumentação

VIAS C/D: pinça MiniGrip® para manipulação e retração

Colecistectomia com MiniLap e MiniPolar 2x3

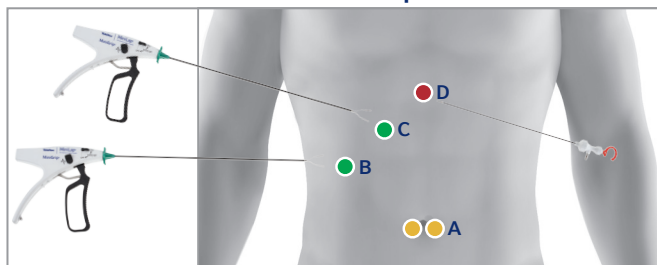

VIA/INSTRUMENTO


INSTRUMENTOS: Laparoscópio, aplicador de cliques, bolsa coletora

VIA A: trocater de 5 mm ou 10 mm para instrumentação

VIAS B/C: pinça MiniGrip® para manipulação e retração

VIAS D: sonda MiniPolar™ para cauterização e dissecação

Apendicectomia com MiniLap 2 x 2

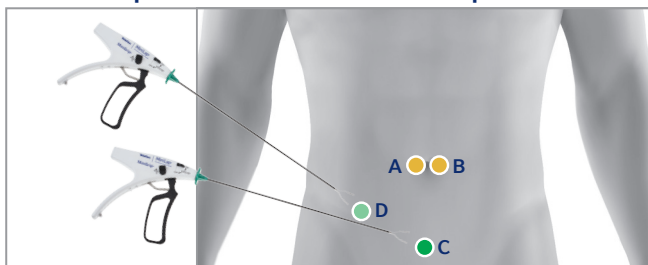

VIA/INSTRUMENTO

VIAS A/B: trocateres de 5 mm ou 10 mm para laparoscópio / instrumentação

VIA C: pinça MiniGrip® para manipulação do apêndice


VIA D: pinça MiniGrip®, alternativa à Via C

COMPARAÇÃO DE VIAS



GUIA DE PROCEDIMENTO – CIRURGIA GINECOLÓGICA


Procedimentos ginecológicos avançados por dois portais
Ooforectomia, hysterectomia, miomectomia

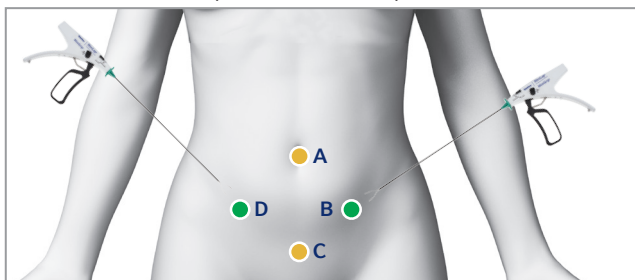

VIA/INSTRUMENTO

VIA A: trocater de 5 mm ou 10 mm para laparoscópio
VIAS B/D: pinça MiniGrip® para manipulação e retração
VIA C: dispositivo de energia e instrumentação


Excisão de endometriose/ aderências com MiniLap 1x2

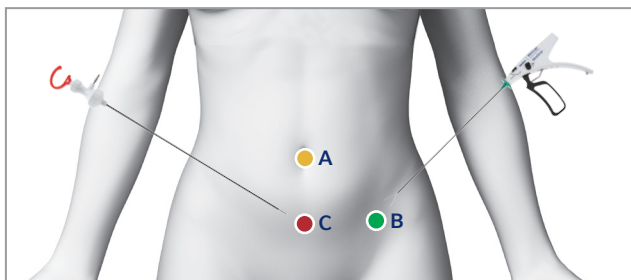

VIA/INSTRUMENTO

VIA A: trocater de 5 mm ou 10 mm para laparoscópio
VIAS B: pinça MiniGrip® para manipulação e retração
VIA C: sonda Electrosurgery MiniPolar Probe usada para ablação de endometriose


Remoção laparoscópica de cisto ovariano

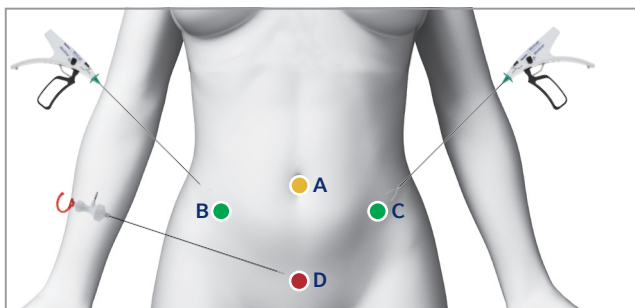

VIA/INSTRUMENTO

VIA A: trocater de 5 mm ou 10 mm para laparoscópio
Segunda via opcional para instrumentação
VIA B/C: pinça MiniGrip® para manipulação e retração
VIA D: sonda MiniPolar™ usada para cauterização e dissecação


Esterilização tubária

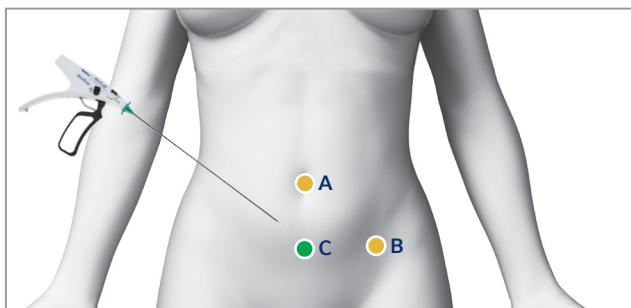

VIA/INSTRUMENTO

VIAS A/B: trocateres de 5 mm ou 10 mm para instrumentação laparoscópica
VIA C: pinça MiniGrip® usada para apreender as tubas uterinas


SISTEMA MINILAP® COM ALÇA MINIGRIP®

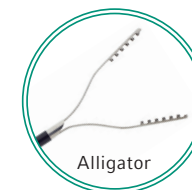


Alligator



Babcock

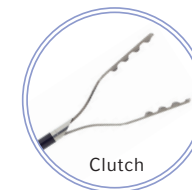

Clutch

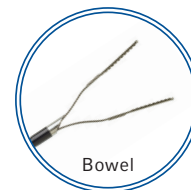

Bowel


MINILAP® PINÇAS PERCUTANEAS




Alligator



Babcock

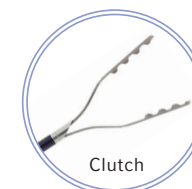

Clutch

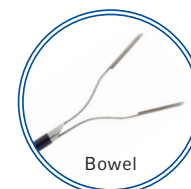

Bowel

MINIPOLAR® SONDAS DE ELETROCIRURGIA



Sonda tipo
espátula curva



Sonda tipo
espátula reta



Sonda tipo
gancho



Sonda tipo
cônica

Para fazer pedidos, ligue para Teleflex Customer Service +1.919.433.4999

Teleflex, MiniLap e MiniPolar são marcas comerciais da Teleflex Incorporated ou de suas afiliadas registradas nos EUA e/ou em outros países.
© 2015 Teleflex Incorporated. Todos os direitos reservados. LA MC-000827 Rev 01 PT

Teleflex®

TELEFLEX LATIN AMERICA 3015 Carrington Mill Boulevard Morrisville, NC 27560 USA
For product information please contact la.cs@teleflex.com or +1.919.433.4999
TELEFLEX.COM